



FUJI DRI-CHEM NX500

Aggiornamento versione software 2.3

Ottobre 2016

1. Scarica l'aggiornamento cliccando al seguente link:

[Aggiornamento Dri-Chem ottobre 2016 - Update-files.7z](#)

2. Attendi il download del file e copia il file scaricato su una chiavetta USB;
3. Da analizzatore spento, inserisci la chiavetta USB con in memoria la cartella **Update files**;
4. Accendi l'analizzatore; comparirà la schermata di avvio con i pallini in movimento e questa schermata sarà visualizzata per circa 10 minuti;
5. Quando si udirà un suono "bip" alternato si può spegnere l'analizzatore e rimuovere la chiavetta USB; l'aggiornamento è andato a buon fine.
6. SE IL SUONO BIP E' FISSO ALLORA CONTATTARE LA NS. ASSISTENZA CLIENTI (0363-360656)
7. Alla riaccensione, cliccare su MODO FUNZIONE > PER L'AMMINISTRATORE > inserisci PASSWORD 500 > CALCOLO PARAMETRI > conferma con SI la pagina > attiva sul SI le due pagine di parametri da calcolare > CLICCA REGISTRA



**Per Informazioni e Assistenza:
scil animal care company S.r.l.
via Rossaro, 11 – 24047 Treviglio
(BG)**

Tel. 0363 360656

Fax: 0363 64527

Email: info-it@scilvet.com

www.scilvet.it