



Istruzioni per l'aggiornamento del software QuickVet®


1. Scaricare il file per l'aggiornamento direttamente cliccando su questo LINK:
http://scilvet.de/fileadmin/downloads/QUICKVET_Update_0915.exe
2. Aprire il file dell'applicazione. (premere il tasto destro del mouse "Open")
3. Clicca su - "Esegui".

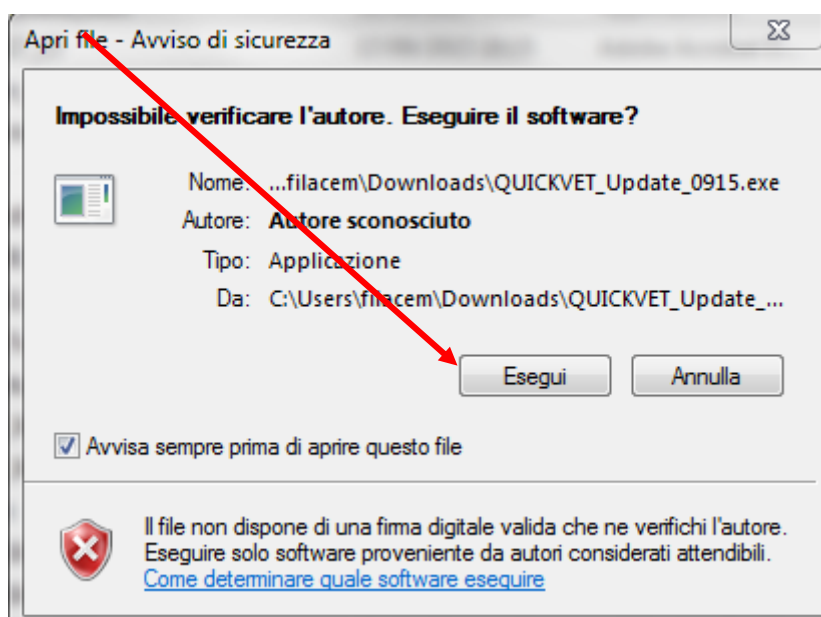

4. Selezionare il percorso di destinazione (cliccare sui tre puntini e selezionare l'unità della chiavetta USB) e fare clic su "Extract".

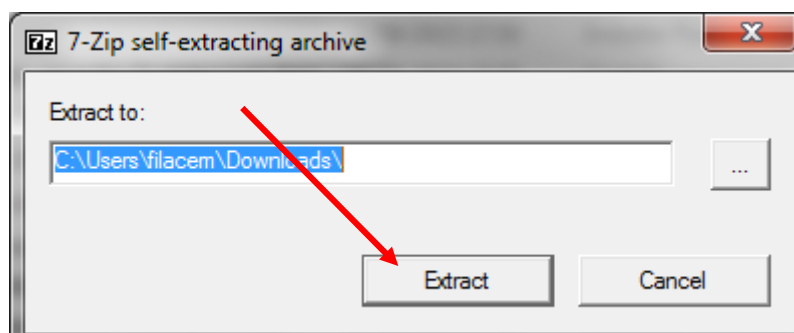


- Inserire la password (axz6vf3) e fare clic su OK.

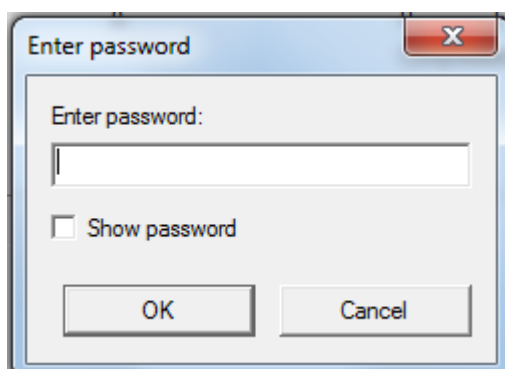


- Spegnere il QuickVet.
- Inserire la chiavetta USB nella porta USB sul pannello posteriore.



- Selezionare il tasto "Setup".

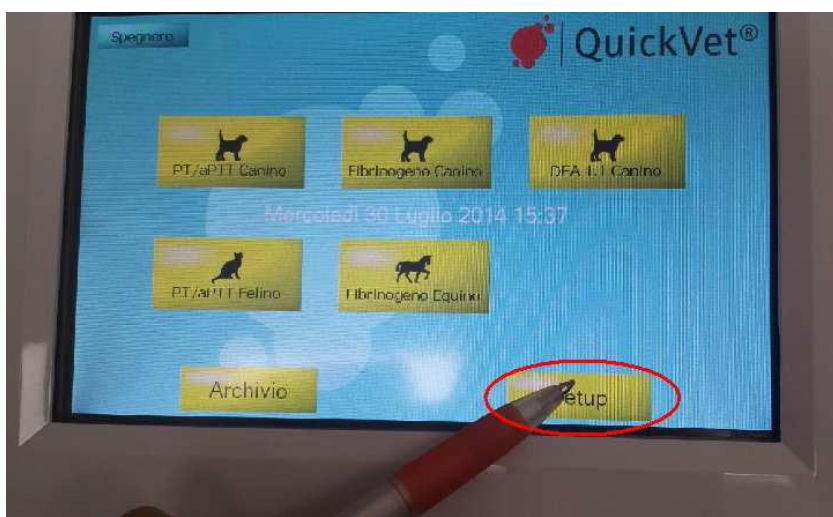


9. Selezionare la voce "Versione Software".

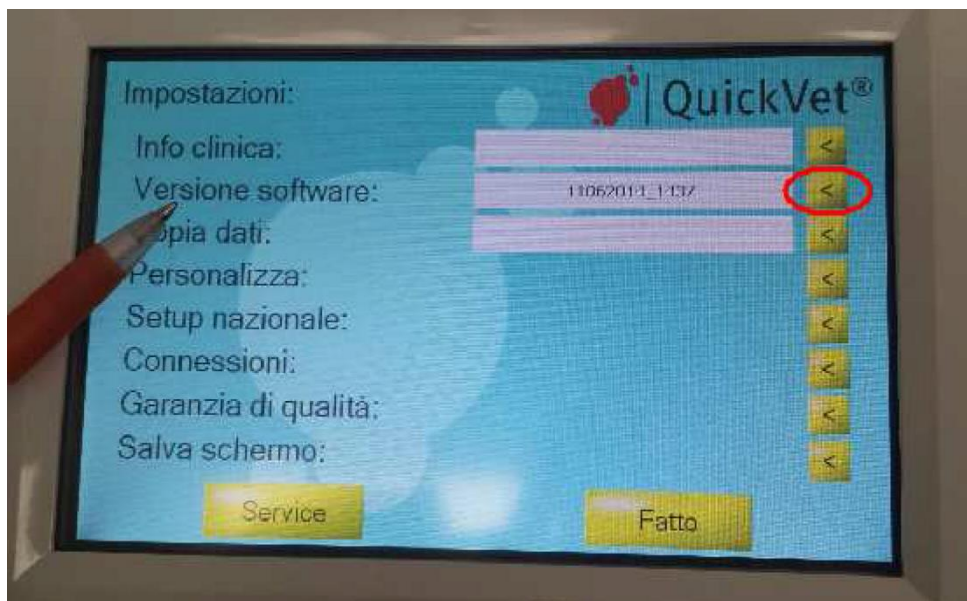

10. < Premere per aprire il menu.

11. Premere **UPGRADE**

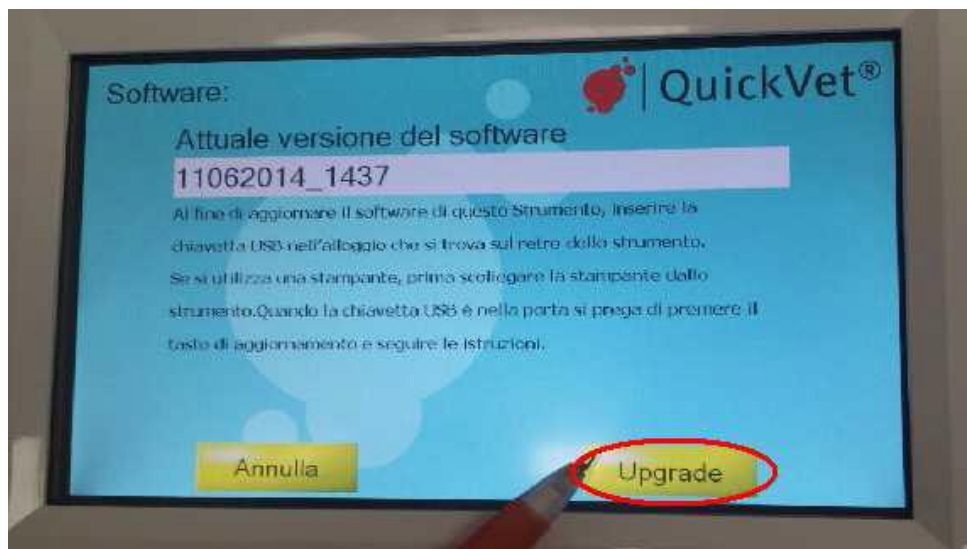


12. Nota: l'aggiornamento alla versione più recente?
Premere **Sì** per confermare l'aggiornamento

13. L'aggiornamento si avvierà automaticamente

14. Quando l'aggiornamento sarà completato, il dispositivo si riavvierà

15. Dal menù principale premere "**Setup**"

16. Selezionare **personalizza**, controllare le impostazioni e modificare se necessario:
- È richiesto ID paziente: -> **Si**
 - È richiesto ID campione: -> **No**
 - Reminder calibrazione: -> **No**
 - Unità di misura Fibrinogeno: -> **g/L**
 - Aggiungere informazioni campione: -> **Una volta**
 - Spegnimento automatico: -> **Nessuno**
 - Reminder calibrazione: -> **Nessuno**

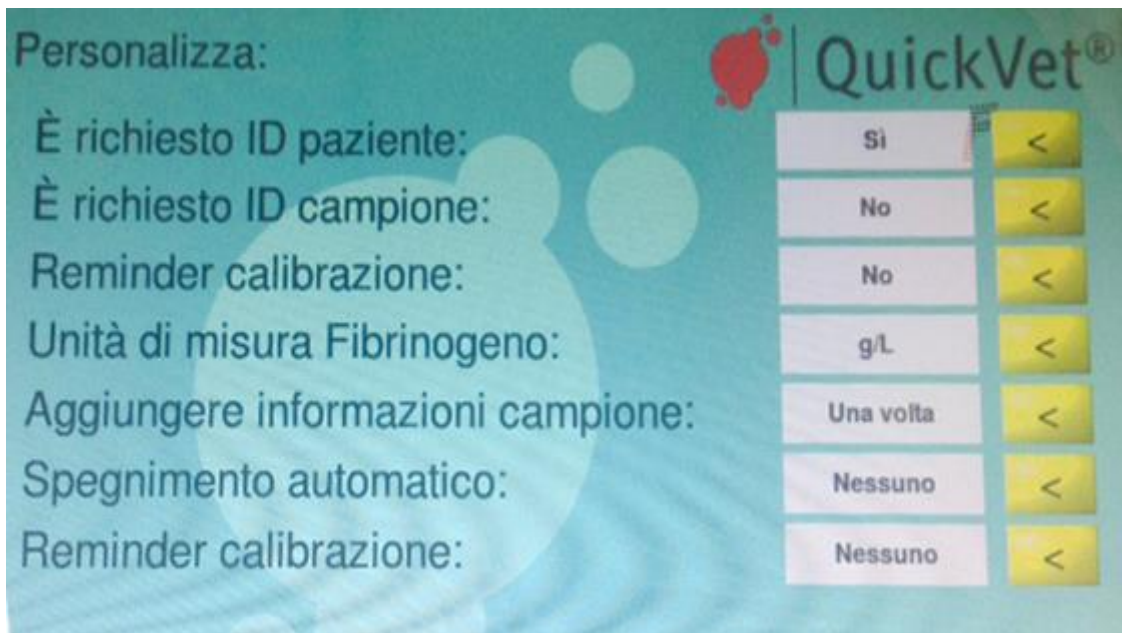

17. Confermare con FATTO

18. Spegnerne analizzatore.