



Fase pre-analitica per scil Vet SA: alcuni consigli e procedure importanti

! Evitare la sedimentazione del campione

! Operare velocemente per scongiurare problematiche connesse alla tipologia di campione (urine)

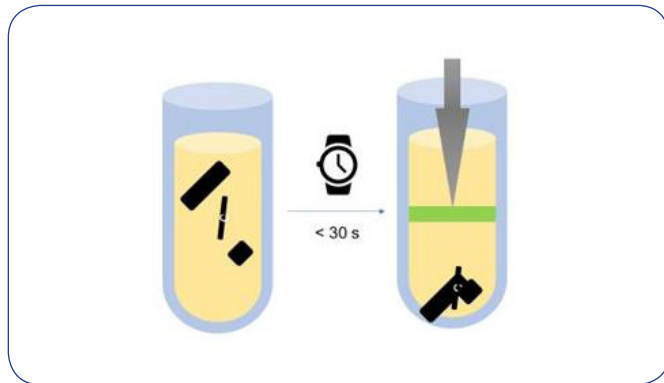

Come preparare il campione:

- 1 Preparare l'analizzatore scil Vet SA prima dell'analisi
- 2 Inserire la specie, l'ID paziente e la modalità di raccolta delle urine
- 3 Mescolare il campione appena prima del prelievo capovolgendo la provetta più volte almeno 30 sec.
- 4 Aspirare con la pipetta dal centro della provetta
- 5 Dopo aver inserito il vetrino nello strumento, cliccare immediatamente  per avviare la misurazione