

Perché effettuare l'aggiornamento?

L'aggiornamento permette al dispositivo di aggiornare i sensori dati che controllano che il portacampione sia inserito correttamente.


Come funziona?




1 Nel menu principale seleziona "Aggiornamenti" (se visualizzi la scritta +1)




2 Scegli "Installa aggiornamento"

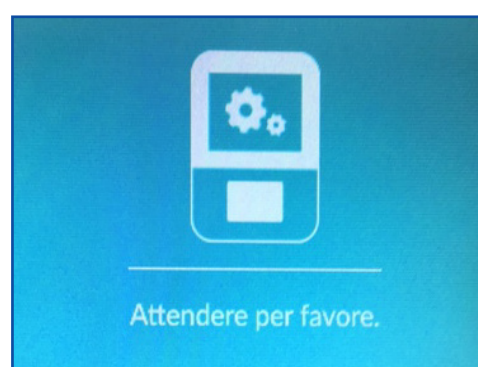


3 Si aprirà una schermata di attesa che durerà alcuni minuti

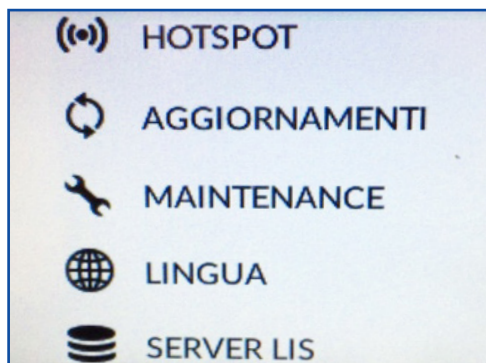

4 Clicca su "Maintenance"

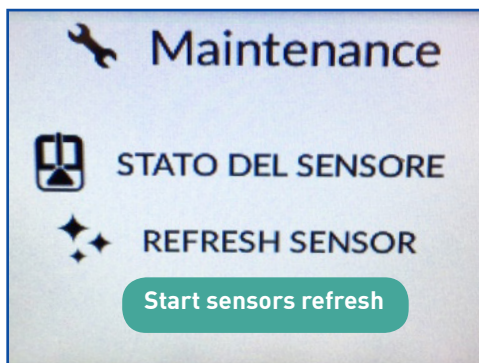

5 Clicca su "Start sensor refresh": ti verrà chiesto di assicurarti che il cursore sia chiuso e che il dispositivo sia in piano sul tavolo. È importante ricordarsi di chiudere lo sportello: il test si effettua senza portacampione.

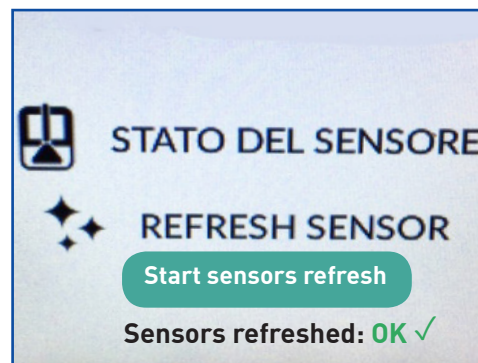

6 Se appare la scritta "OK" il sistema tornerà alla schermata iniziale. In caso contrario, è sufficiente chiudere lo schermo e ripetere la procedura. Qualora anche questa fallisca, contatta il supporto tecnico.