

Limiti di riferimento cCRP su Samsung PT10

Ottobre 2019

Contenuto della guida

- Procedura per l'inserimento dei limiti di riferimento della Proteina C Reattiva

Informazioni e risoluzione problemi

Reparto di assistenza tecnica
scil animal care company S.r.l.
Tel: 0363 360656 (Tasto 2)
Fax: 0363 64527
Email: assistenza@scilvet.com



Data ultima modifica 14/10/2019

Inserimento dei limiti di riferimento

- Dal menù principale, premere sulle “Impostazioni”



- “Analisi”



- “Intervallo di riferimento”



- Selezionare la specie “Canino” e poi premere “Modifica”




- Scorrere l’elenco dei parametri fino alla voce “CRP”; premere il campo del valore minimo per modificarlo




- Modificare i parametri rispettivamente con “0” e “10”; per passare al campo max premere sul campo corrispondente



- Confermare con il tasto “OK”

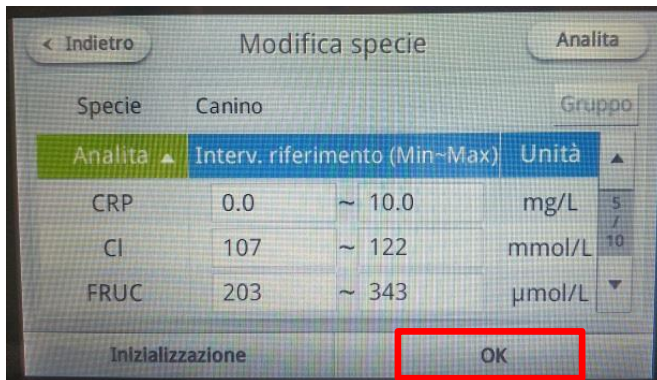

- Tornare indietro premendo “Indietro” fino al menù principale

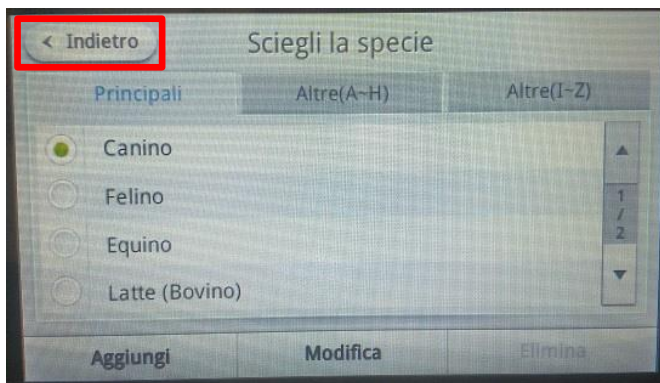

<<FINE>>

Da questo momento in poi i risultati della cCRP verranno esportati a vIP e stampati con i limiti di riferimento sopra indicati.