



Element RC – Procedura Aggiornamento Software


- Procurarsi una chiavetta USB **vuota** e inserirla in un PC che sia collegato a Internet.
- Aprire il seguente link: <https://my.hidrive.com/share/t0.fcilz9j>
- Cliccare il tasto “Download all” in alto a destra

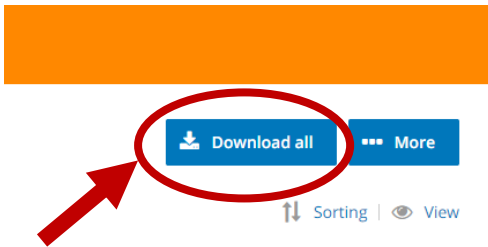

- Al termine del download aprire con doppio clic del mouse la cartella zippata appena scaricata.
- Comparire la cartella non zippata nominata “**upgradepackage**”
- Copiare **tal quale** la cartella “upgradepackage” sulla chiavetta USB **vuota**

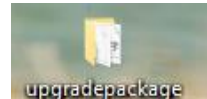

- Espellere la chiavetta USB
- Andare alla macchina Element RC. L’analizzatore **deve essere spento**.
- Inserire la chiavetta USB in una delle porte USB sul retro dell’analizzatore.
- Accendere l’analizzatore.
- Seguire le istruzioni che compaiono sul display che chiedono se installare il nuovo aggiornamento e premere OK.
- Attendere che il sistema installi l’aggiornamento.
- Dopo che l’aggiornamento è andato a buon fine comparirà sul display la seguente schermata:

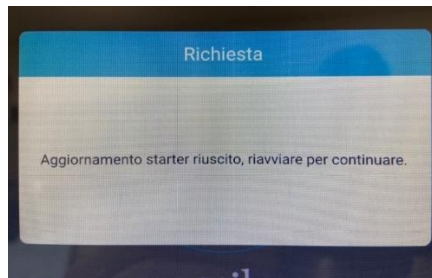

- Spegnerlo strumento e rimuovere la chiavetta USB.
- Accendere lo strumento, l’aggiornamento è completato.
- Controllare in alto a destra sulla schermata principale che la versione del software sia aggiornata 1.00.01.16
- Premere “Impostazioni” a sinistra e poi “Altre impostazioni” e infine “Impostazioni specie”: verificare che le specie coniglio e furetto abbiano il pallino azzurro attivo.
- Tornare alla schermata iniziale. La macchina è pronta per essere utilizzata per la prossima analisi.

PROCEDURA TERMINATA